

造口底盘说明书

【型号规格】250、260、270、T250、T260、T270、WT250、WT260、WT270

【医疗器械生产备案凭证号】苏宁药监械生产备 20210013 号

【医疗器械产品备案凭证号】苏宁械备 20180029 号

【产品技术要求编号】苏宁械备 20180029 号

【产品性能、结构组成】

造口底盘为回肠、结肠、直肠和尿道造口的护理器械，接触完好皮肤和肠内腔，非无菌提供。造口底

盘由水胶体粘贴盘、平面连接底环/凸面连接底环/微凸连接底环、底盘粘边(适用于平面造口底盘)、

保护纸/膜（含剪孔刻度）组成。

产品粘性符合 YY/T0148-2006 标准要求。

【适用范围】

产品适用于造口护理和排泄物的收集。

【使用方法】

1.造口周围皮肤准备和清洗

使用前，请清洁您的双手和造口周围皮肤，保持清洁、干燥并且没有油性物质。

2.剪裁底盘

根据造口大小形状及凹陷程度，选用相应型号的造口底盘，可先在剪孔刻度盘上画好标记，将底盘从里往外裁剪到适合自己造口的形状、尺寸。

3.除去粘贴保护纸

用拇指按住粘胶的一边，用另一只手揭开保护纸/膜。

4.贴戴底盘

将底盘沿着造口适度紧密的贴在皮肤上，由底部开始，用手指紧压一会，然后平整的向上，使底盘紧贴皮肤。

5.装上造口袋

从连接底环底部开始，手指沿着袋接环外部由下往上将袋子和底盘按紧。当听见轻轻的“咔嗒”一声，说明袋子已安全的装在了底盘上。调整袋子至最佳位置。

注：为确保袋子与底盘已牢牢安装上，可在安装完后向外拉拉袋子。



6.除去袋子和底盘

袋子：用一只手提起造口袋；另一只手捏住袋体连接环上的小凸耳，从上至下，沿连接环一周，轻轻往外拉，直至相扣的连接环全部分离开，即可取下袋子；

底盘：用一只手按住皮肤，另一只手小心缓慢的自上而下将底盘揭掉。

【禁忌症】 无

【注意事项及警示信息】

1. 使用前请咨询您的造口护士或医生，根据造口类别及大小，选择适合的产品；
2. 根据实际需要更换产品。换下的造口袋遵照当地的废弃物处置要求和规则处理。不能直接冲入厕所及下水道，不能随意丢弃，注意保护环境。
3. 如您发现皮肤刺激、过敏等现象，请暂停使用并及时咨询医疗专业人员。
4. 非灭菌产品，一次性使用，重复使用可能影响产品性能，造成潜在风险。

【生产批号及生产日期】 见包装

【失效日期】 见包装

【储存条件】 干燥、通风环境储存，避免阳光直射，储存温度 10℃~30℃。

【备案人、生产企业名称及售后服务单位】 江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】 南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号 6 幢 102、202、302

【住 所】 南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号

【联系方式】 电话：025-57678895 **【网址】**： www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】 2024 年 2 月 27 日

