

体表导管固定装置说明书

【型号规格】

粘贴式分为A型、B型、C型、D型、G型、H型、I型、J型、K型、L型、M型、N型、O型、P型；
绑带式分为E型、F型

【医疗器械生产备案凭证号】苏宁药监械生产备 20210013 号

【医疗器械产品备案凭证号】苏宁械备 20210168 号

【产品技术要求编号】苏宁械备 20210168 号

【产品性能、结构组成】


体表导管固定装置按用途分为粘贴式和绑带式。体表固定装置由体表固定座和导管固定座组成。
可以将医用导管有效地固定于体表。

【适用范围】

用于病患体表固定医用导管，不接触创口，为一次性使用非无菌产品。


【A\N\O 型使用方法】


这三种型号主要配合 PICC 管或 CVC 导管使用，下图以 A 型举例说明。

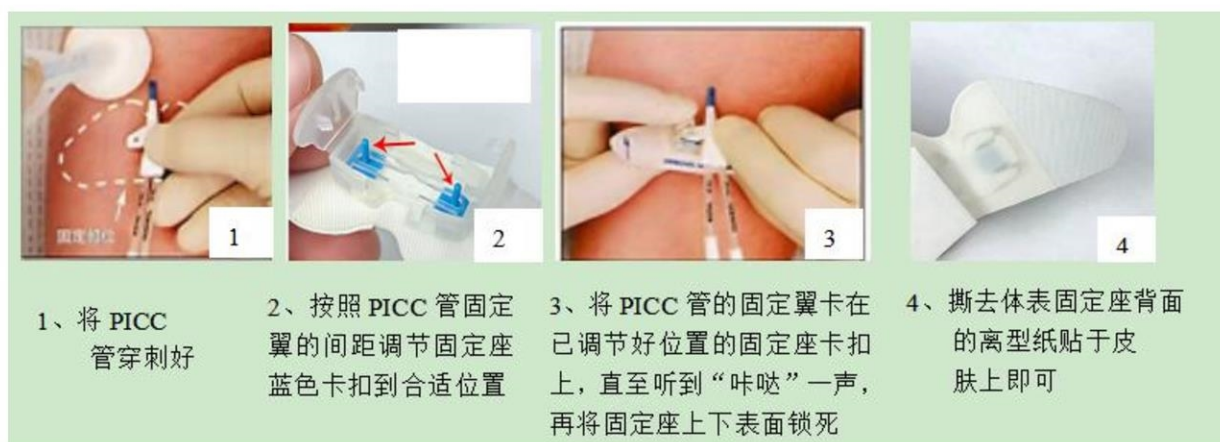

【B\C\D 型使用方法】

这三种型号可以固定大部分导管(单双腔导尿管、引流管等)，下图以 B 型举例说明：

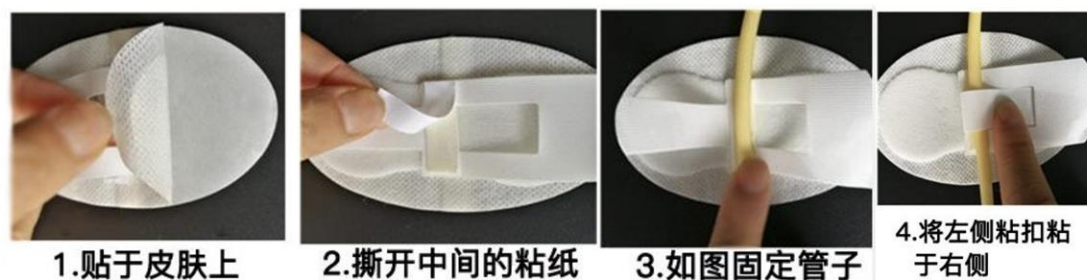

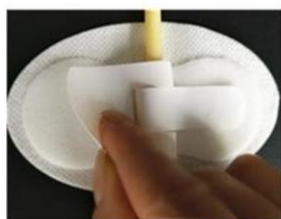

5.将右侧粘扣如图粘于左侧



6.如上图固定完毕

【GHJKMP 型使用方法】

这六种型号可以固定大部分导管，可以根据使用的单管、双管等选择不同的固定装置，下图以 M 型（双管）举例说明：



1、将 V 型贴背面的离型纸撕掉，顶端贴于皮肤表面



2、将 V 型贴两条腿部分分别将两根导管缠绕固定即可

【IL 型使用方法】

这两种型号用来固定大部分较细的导管，下图以 I 型举例说明：




1、将产品毛面封口器和刺面封口器分离



2、撕去中间离型纸



3、将导管固定在中间泡沫胶部分并按压牢固

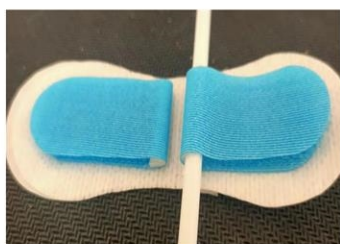

4、将产品毛面封口器和刺面封口器按压牢固即可



5、将另一侧重复 1-4 步骤，完成如上图所示



【E 型使用方法】

E 型主要用于固定气切导管，具体步骤如下：



1、将产品从纸塑袋取出，并全部展开



2、将固定带封口器穿过气切导管



3、将固定带封口器和固定带固定即可

【F 型使用方法】

F 型主要用于胃造瘘管固定用，搭扣可灵活应用，具体步骤如下：



1、将产品从纸塑袋取出，并全部展开



2、将胃造瘘管穿过搭扣固定即可。



【禁忌症】 开放性伤口均禁止使用。

【注意事项及警示信息】

- 1.包装破损或超出有效期请勿使用。
- 2.禁止用于皮肤破损处，输液及注射配套使用应避开穿刺位置。
- 3.如发现皮肤刺激、过敏等现象，请暂停使用并及时咨询医疗专业人员。
- 4.非无菌产品，一次性使用，重复使用可能影响产品性能，造成潜在风险。
- 5.产品短期使用，建议使用时间不超过一周。

【生产批号及生产日期】见包装

【失效日期】见包装

【储存条件】干燥、通风环境储存，避免阳光直射。

【备案人、生产企业名称及售后服务单位】江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】南京市六合区龙池街道槽枋路9号6幢102、202、302

【住 所】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号

【联系方式】电话：025-57678895 【网址】：www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】2024 年 2 月 27 日

