

引流袋说明书

【产品名称】引流袋

【型号规格】500ml、1000ml、1500ml、2000ml、3000ml、5000ml

【医疗器械生产备案凭证号】苏宁药监械生产备 20210013 号

【医疗器械产品备案凭证号】苏宁械备 20170004 号

【产品技术要求编号】苏宁械备 20170004 号

【产品性能结构】产品具有防逆流设计，主要由排出管、排放开关、贮液袋、挂带、引入管、接头、接头帽、引入管开关、固定绳索、引入管套管组成。

其中防逆流设计可有效降低尿路逆流感染几率，建议使用时间不超过 7 日。

【适用范围】

本产品用于向体外引出并收集体内液体。

【使用方法】

1. 使用前请先洗手，取出折叠在单包装袋内的引流袋，将袋体展平，特别是袋体的入口处。
2. 关闭贮液袋的排出开关，拔除接头帽，接入引入管至引流导管。
3. 打开引入管开关，观察体液是否进入袋体，收集粘稠物或血块偏多的体液，可能会发生输入口处堵塞，请密切注意引流顺畅性。体液进入贮液袋后，可将引流袋悬挂起来，注意悬挂位置应低于引流部位。
4. 排空体液时，应先将排放阀放入便池内或适当的容器内，然后打开排出开关，切记倒空后应立即将排出开关关闭。断开接头处的连接时，应将袋体上方的输入管的节流阀关闭。

【禁忌症】 无

【注意事项及警示信息】

1. 使用前请检查包装，如有破损，禁止使用。
2. 产品使用后请按相关规定予以处理，注意环保。
3. 产品建议一次性使用。
4. 产品未经灭菌。
5. 产品货架寿命为三年。

【生产批号及生产日期】见包装

【失效日期】见包装



【储存条件】本品在运输时应防止重压、阳光直晒和雨雪浸淋；应贮存在无腐蚀性气体、通风良好、干燥的清洁室内。

【备案人、生产企业名称及售后服务单位】江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】南京市六合区龙池街道槽枋路9号6幢102、202、302

【住 所】南京市六合区龙池街道槽枋路9号

【联系方式】电话：025-57678895 【网址】：www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】2024年2月27日

