

造口皮肤保护剂说明书

【型号规格】1901、1905、1910、1915、1920、1930

【医疗器械生产备案凭证号】苏宁药监械生产备 20210013 号

【医疗器械产品备案凭证号】苏宁械备 20190059 号

【产品技术要求编号】苏宁械备 20190059 号

【产品性能、结构组成】

产品为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供。主要成分为丙烯酸树脂等混合制成。产品 PH 值为 6.0~8.0，成膜时间不超过 60 秒。

【适用范围】适用于造口周围皮肤护理。

【使用方法】

1. 用温水清洗造口周围皮肤并晾干。
2. 将产品均匀的涂抹于皮肤上。
3. 数秒钟后，皮肤上会自然形成一层保护膜，然后再粘贴底盘。
4. 更换造口袋或底盘时，不必特意将保护膜剥除，它会随粘贴件一起被揭下。
5. 沐浴或多次接触水后，保护膜可能会脱落，建议再次使用。

【禁忌症】对产品成分过敏者慎用。

【注意事项及警示信息】

1. 非无菌产品，袋装产品拆开后请一次性用完，请勿重复使用。
2. 请勿接近眼部使用，不慎接触眼睛，应立即用水冲洗后，迅速就医。
3. 如有过敏现象，请停止使用并咨询医生。
4. 请勿将产品用于破损或感染的皮肤。
5. 请勿过期使用该产品。

【生产批号及生产日期】见包装

【失效日期】见包装

【储存条件】储存于干燥、通风良好的环境中，避免阳光直射，避免火源和易燃物。

【备案人、生产企业名称及售后服务单位】江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号 6 幢 102、202、302

【住 所】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号

【联系方式】电话：025-57678895 【网址】：www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】2024 年 2 月 28 日

