

造口护肤粉说明书

【型号规格】1025

【医疗器械生产备案凭证号】苏宁药监械生产备 20210013 号

【医疗器械产品备案凭证号】苏宁械备 20180063 号

【产品技术要求编号】苏宁械备 20180063 号

【产品性能、结构组成】

造口护肤粉主要由羧甲基纤维素钠、瓜尔豆胶和黄原胶混合制成。

产品粒径 $\leq 150\mu\text{m}$, PH 值在 3.5~8.0 范围, 干燥失重 $\leq 10\%$ 。

【适用范围】适用于造口周围皮肤护理。

【使用方法】

1. 用温水清洗造口及造口周围皮肤, 保持皮肤干净及干燥。
2. 旋开瓶盖, 将瓶嘴对准需要保护的皮肤, 轻轻晃动瓶身, 将适量粉剂撒在皮肤上。
3. 用细纱布或纸巾将粉剂抹匀。

【禁忌症】无

【注意事项及警示信息】

1. 仅供外部使用。
2. 如果造口周围皮肤出现溃烂, 请先咨询医护人员; 如果皮肤有过敏反应, 应立即停止使用。
3. 用完后, 请及时盖上瓶盖, 以免吸水受潮。

【生产批号及生产日期】见包装

【失效日期】见包装

【储存条件】储存于干燥、通风环境中, 避免阳光直射。

【备案人、生产企业名称及售后服务单位】江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号 6 幢 102、202、302

【住 所】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号

【联系方式】电话: 025-57678895 【网址】: www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】2024 年 2 月 27 日

