

造口腰带说明书

【型号规格】1072

【医疗器械生产备案凭证号】苏宁药监械生产备 20150023 号

【医疗器械产品备案凭证号】苏宁械备 20200173 号

【产品技术要求编号】苏宁械备 20200173 号

【产品性能、结构组成】

造口腰带由高分子纤维松紧带、高分子塑料锁扣组成。

【适用范围】适用于造口的护理，辅助造口袋/造口底盘的使用。

【使用方法】

造口腰带

1. 与一件式造口袋配套使用：额外需要一个扣盘（需自配），先将扣盘置于一件式造口袋的袋子与底盘之间，再将腰带绕过腰部扣在扣盘两侧的扣眼中并调整腰带到合适的长度。
2. 与两件式造口袋配套使用：先将所使用的造口底盘粘贴好，将两件式造口袋与底盘扣合好后，调整腰带到合适的长度，再将腰带绕过腰部扣在袋体两侧的扣眼中。

【禁忌症】 无

【注意事项及警示信息】

1. 产品以非无菌形式提供。
2. 可用冷水或温水清洗造口腰带和造口腹带，请勿使用热水或漂白剂清洗，会减弱产品弹性；洗后应放在室外晾干，避免暴晒。

【生产批号及生产日期】见包装

【失效日期】见包装

【储存条件】干燥、通风良好的环境，避免阳光直射。

【备案人、生产企业名称及售后服务单位】江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号 6 幢 102、202、302

【住 所】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号

【联系方式】电话：025-57678895 【网址】: www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】2024 年 2 月 27 日

