

造口防漏圈说明书

【型号规格】1071、1073

【医疗器械生产备案凭证号】苏宁药监械生产备 20210013 号

【医疗器械产品备案凭证号】苏宁械备 20200208 号

【产品技术要求编号】苏宁械备 20200208 号

【产品性能、结构组成】

造口防漏圈为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械，接触完好皮肤。由粘性水胶体和离型纸组成。其中粘性水胶体由羧甲基纤维素钠、热熔胶等混合加工制成。

【适用范围】

适用于造口周围皮肤的护理，用于填平皮肤上的凹陷/皱褶，在造口和造口底盘之间提供密封。

【使用方法】

1. 取出造口防漏圈，撕下双面保护纸。
2. 用手拉伸造口防漏圈，使其中心孔与造口大小相近，套向造口。
3. 调整造口防漏圈中心孔，使其与造口周围皮肤紧密贴合，形成密封；然后再次按压造口防漏圈外沿，使其粘贴牢固。

【禁忌症】无

【注意事项及警示信息】

1. 产品仅供外用。
2. 一次性使用产品，请勿重复使用。
3. 如发现皮肤刺激、过敏等现象，请暂停使用并及时咨询专业医疗人员。
4. 使用前应先将皮肤清洁擦干以免影响粘性。
5. 仅用于完好皮肤上，请勿与创面直接接触。
6. 根据实际需要更换产品，换下的产品不能直接冲入厕所及下水道，不能随意丢弃，注意保护环境。

【生产批号及生产日期】见包装

【失效日期】见包装

【储存条件】干燥、通风良好的环境，避免阳光直射，储存温度 10℃~30℃。

【备案人、生产企业名称及售后服务单位】江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号 6 幢 102、202、302

【住 所】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号

【联系方式】电话：025-57678895 【网址】：www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】2024 年 2 月 27 日

