

固定胶贴说明书

【型号规格】1074、1078、1079

【医疗器械生产备案凭证号】苏宁药监械生产备 20210013 号

【医疗器械产品备案凭证号】苏宁械备 20190138 号

【产品技术要求编号】苏宁械备 20190138 号

【产品性能、结构组成】

固定胶贴为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械，接触完好皮肤，非无菌提供。
由背材（聚氨酯膜）、胶粘剂（粘性水胶体）、保护层（离型纸）组成。

【适用范围】

适用于造口的护理，用于加固造口底盘的边缘同皮肤的有效黏贴。

【使用方法】

1. 握住胶贴上小片保护贴纸一端，先撕去大片的保护贴纸；
2. 将胶贴宽度的一半覆盖住底盘边缘，黏贴在底盘及皮肤上，揭去剩余的小片保护纸，将胶贴用手抚平以紧密贴合皮肤；
3. 建议一次使用 2 片，固定底盘效果会更好。

【禁忌症】 无

【注意事项及警示信息】

1. 一次性使用产品，请勿重复使用。
2. 如发现皮肤刺激、过敏等现象，请暂停使用并及时咨询专业医疗人员。
3. 使用前应先将皮肤清洁擦干以免影响粘性。
4. 仅用于完好皮肤上，请勿与创面直接接触。

【失效日期】 见包装

【生产批号及生产日期】 见包装

【储存条件】 干燥通风的环境，储存温度 10℃~30℃，避免阳光直射。

【备案人、生产企业名称及售后服务单位】 江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】 南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号 6 幢 102、202、302

【住 所】 南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号

【联系方式】 电话：025-57678895 网址：www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】 2024 年 2 月 27 日

