

水胶体敷贴说明书

【型号规格】

普通型：5101、5102、5103、5104、5105、5106、5107、5108、5119、5120、5109、5110、5111、5121

压边型：5112、5113、5114、5115、5116、5117、5118

【医疗器械生产许可证编号】苏药监械生产许 20170154 号

【医疗器械注册证编号】苏械注准 20192140946

【产品技术要求编号】苏械注准 20192140946

【产品性能、结构组成】

水胶体敷贴由背衬、粘性水胶体层、隔离层组成；其中，背衬由聚氨酯膜制成，粘性水胶体层由热熔胶和符合 2020 版《中国药典》羧甲基纤维素钠和聚异丁烯制成，隔离层离型纸为格拉辛纸或 CKK 纸。该产品以无菌状态提供，经辐射灭菌，一次性使用。

【适用范围】

用于非慢性创面的覆盖和护理。

【使用方法】

1. 用生理盐水清洗伤口，轻轻将伤口周围皮肤擦干。
2. 根据需求选择相应规格的水胶体敷贴，将保护纸撕开，将有粘性的一面覆盖在伤口上。
3. 用手指轻压边缘几下以加强固定效果。

【禁忌症】对水胶体材质过敏者慎用。

【注意事项及警示信息】

1. 使用前应将创面充分清洗，并擦干创缘皮肤。
2. 应选择比创面边缘宽约 2cm 的水胶体敷贴以保证与皮肤之间充分粘合。
3. 敷贴吸收膨胀后鼓起发白属正常现象，当吸收饱和时，提示要更换敷贴。如遇有难以剥离的情况，可以使用冰袋冷敷 3-5 分钟降低粘性，再慢慢剥离。
4. 由于使用中水胶体分子与渗出液融合，形成凝胶；有时外观上像脓性分泌物，故被误认为创面感染，此时用生理盐水冲洗干净即可。
5. 使用水胶体敷贴有时会产生一定的气味，用生理盐水清洁伤口后气味即可消失。
6. 如粘贴周围有渗漏，请及时更换敷贴。
7. 本产品经辐射灭菌，一次性使用；单包装破损，禁止使用。
8. 根据伤口渗出量和敷贴吸收情况而定，一般 1-3 天更换一次，最长不超过 7 天。
9. 更换的产品请遵照废弃物处置的要求进行处理，请勿随意丢弃。



【生产批号及生产日期】见包装

【失效日期】见包装

【储存条件】干燥、通风环境储存，避免阳光直射，储存温度 10℃~30℃。

【标签符号】



经辐射灭菌



如包装破损切勿使用



不得二次使用



查阅使用说明

【注册人、生产企业名称及售后服务单位】江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号 6 幢 102、202、302

【住 所】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号

【联系方式】电话：025-57678895 网址：www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】2024 年 3 月 1 日

