

藻酸盐敷料说明书

【型号规格】

非自粘型：5201、5202、5203、5204、5205、5206、5207、5208、5209、5210

自粘型：5211、5212、5213、5214、5215、5216、5217、5218、5219、5220

【医疗器械生产许可证编号】苏药监械生产许 20170154 号

【医疗器械注册证编号】苏械注准 20222140962

【产品技术要求编号】苏械注准 20222140962

【产品性能、结构组成】

藻酸盐敷料根据产品是否自带粘性，分为自粘型和非自粘型；其中，自粘型由背衬、敷芯、隔离纸组成，背衬由 PU 膜制成，敷芯为藻酸盐纤维，隔离层离型纸为格拉辛纸或 CKK 纸；根据形状尺寸不同分为 10 种规格；非自粘型由藻酸盐纤维制成，根据形状尺寸不同分为 10 种规格。该产品以无菌状态提供，经辐射灭菌，一次性使用。

产品具有良好的渗液吸收能力，吸收渗液后形成凝胶保护伤口。

【适用范围】用于非慢性创面的覆盖和护理，吸收创面渗液。

【禁忌症】对本产品或其成分过敏者慎用。

【注意事项及警示信息】

1. 本产品不建议使用于干燥的伤口。
2. 本产品仅限一次性使用，不得重复使用。
3. 产品超出有效期请勿使用。
4. 本产品经辐射灭菌，一次性使用；单包装破损，禁止使用。

【生产日期及生产批号】见包装

【失效日期】见包装

【使用方法】

1. 使用前，先清洁或消毒伤口。
2. 根据伤口大小选择相应规格的产品，将保护纸撕开，将敷料贴到皮肤上，然后轻按整个敷料，并从中间向四周抚平，以达到固定效果；然后去除边框保护纸或背衬的薄膜。非自粘型敷料需要使用医用胶带或二级敷料固定。
3. 藻酸盐敷料被渗出液浸透时，需及时更换，使用量根据伤口大小及渗液多少决定。



4. 开始阶段，根据渗出液情况进行更换；单片使用时间最长不可超过 5 天，并使用至伤口愈合为止。

【储存条件】在干燥通风环境储存，避免阳光直射。

【标签符号】



经辐射灭菌



如包装破损切勿使用



不得二次使用



查阅使用说明

【注册人、生产企业名称及售后服务单位】江苏汇锦然医疗器械有限公司

【生产地址】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号 6 幢 102、202、302

【住 所】南京市六合区龙池街道槽枋路 9 号

【联系方式】电话：025-57678895 网址：www.ostupmedical.com

【说明书修订日期】2024 年 3 月 1 日

